


6- Mise en place de la boucle conventionnelle ou électronique :

La même pince permet de poser la 2nde boucle.
Détacher le kit pointeau situé dans le manche de la pince.
Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince et insérer le kit pointeau, puis relâcher le verrou.

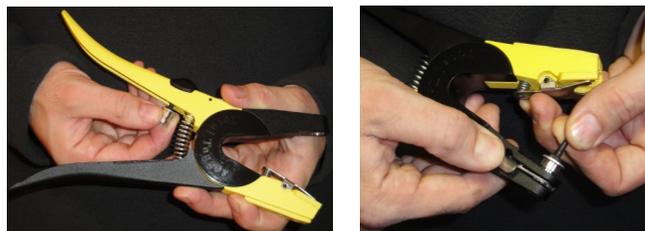

Mise en place des pièces mâle et femelle :



Placer la boucle mâle sur le pointeau.

Insérer la boucle femelle sous la pédale.




 **Pour poser une boucle électronique, il faut au préalable avoir retiré l'adaptateur plastique jaune, afin de pouvoir glisser la partie renflée de ce type de boucle contenant le transpondeur.**



Tester l'approche du pointeau vers la partie femelle, pour s'assurer qu'ils sont bien alignés.

La boucle ULTRA ou SELECT-ULTRA doit être posée sur l'oreille gauche.

Positionner la boucle entre les 2 nervures, à un tiers de distance de la tête (cible jaune).

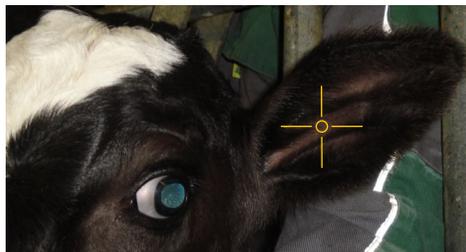

La partie femelle est placée à l'intérieur de l'oreille.
Serrer fermement la pince. Vous entendez l'encliquetage.
Ouvrir la pince immédiatement après l'encliquetage.



La boucle ULTRA est posée fermement à l'oreille.
Elle est reconnaissable à sa tête noire.

Terminer la pose en lui faisant faire un quart de tour dans un sens puis dans l'autre afin de bien couper les chairs.



Après la pose, surveiller la cicatrisation et désinfecter si nécessaire.

Allflex

Notice boucles ULTRA TST France, réf. n° 740 50 570

Allflex

Notice de pose boucle ULTRA TST



Boucles de naissance N98 ou N10 avec biopsie auriculaire

1- Contenu de la commande :

A chaque paire de boucles de naissance, sont associés :

- 1 étiquette échantillon au même numéro,
- 1 étiquette adresse laboratoire,
- 1 sachet mini-grip,
- 1 enveloppe pré affranchie.

Utiliser la pince adaptée spécifique :
Pince TOTAL TAGGER UNIVERSELLE pour prélèvement TST jaune/noire.



2- Préparation de la boucle de prélèvement :


- ③ Tube de prélèvement
- ① Pièce mâle de prélèvement avec aiguille associée

- ② Pièce femelle



⚠ Toutes les pièces sont marquées au même numéro et présentées ensemble sur la barrette. NE PAS LES DISSOCIER.

Mise en place de la pièce mâle ① :

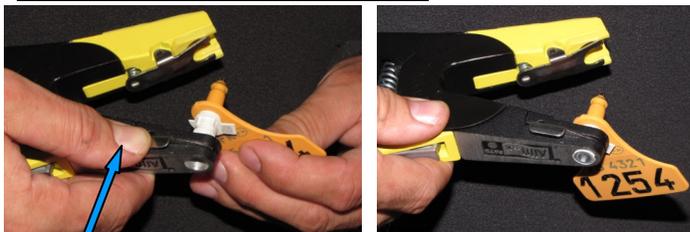

Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince. Insérer la pièce mâle ① et relâcher le verrou. La pièce mâle est en place.

Mise en place de la pièce femelle ② :




Appuyer sur la pédale. Insérer la pièce femelle ②. Puis relâcher la pédale. La pièce femelle est en place.

3- Mise en place de la boucle et prélèvement :

Contentionner l'animal et attendre qu'il se soit calmé, Eviter que l'animal bouge pendant le prélèvement.


La boucle ULTRA TST doit être posée sur l'oreille droite.

Positionner la boucle entre les 2 nervures (représentées par les traits blancs), à un tiers de distance de la tête (cible jaune)

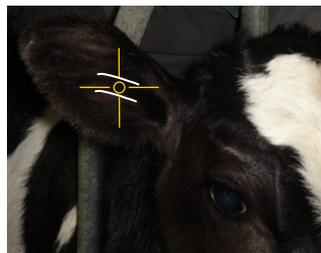


La partie femelle ② est placée à l'intérieur de l'oreille. Serrer fermement la pince. Vous entendez l'encliquetage. Ouvrir la pince immédiatement après l'encliquetage.

La boucle ULTRA TST est posée définitivement à l'oreille, elle est reconnaissable à sa tête blanche. L'aiguille de prélèvement reste sur la pince.

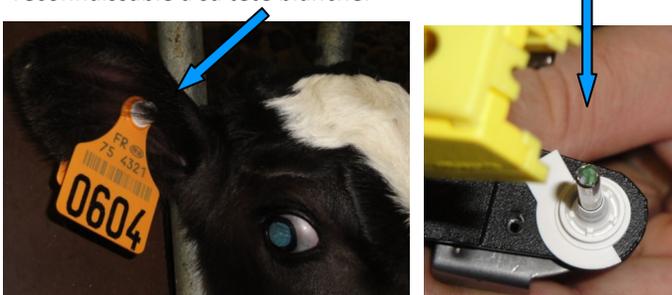


4- Fermeture du tube sur l'aiguille et retrait de l'ensemble de la pince :

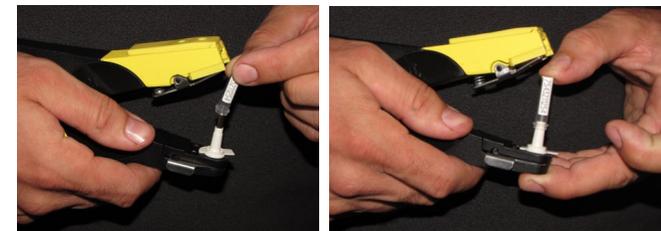

Poser le tube ③ sur l'aiguille et l'encliqueter sur le support aiguille avec les doigts.

Appuyer sur le verrou situé sur le côté de la pince et retirer l'ensemble aiguille + tube de la pince.

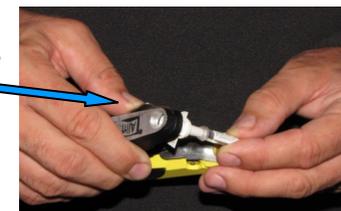

5- Envoi de l'échantillon au laboratoire :


-Insérer l'ensemble aiguille + tube dans le sachet mini-grip fourni.



-Ajouter également l'étiquette en complétant les informations (date de prélèvement), puis fermer le sachet mini-grip.



-Glisser le sachet dans l'enveloppe fournie.

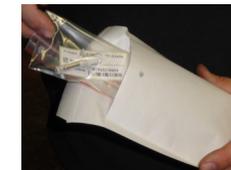

-Coller l'étiquette-adresse du laboratoire dans le cadre réservé sur l'enveloppe.



-Puis l'expédier par La Poste.

NB : L'échantillon doit être expédié le jour même, ou conservé au frais (réfrigérateur) pour être expédié dans les 48 heures au laboratoire. Ne mettre qu'un seul échantillon par enveloppe.